

Cellsorba™ EX

ASAHI LÖKOSİTAFEREZ (LCAP) KOLONU



Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı için lökosit uzaklaştırma

- *İnflamatuvar barsak hastalığı (İBH) tedavisi için*
- *İnflamasyonda rol oynayan lökositlerin uzaklaştırılması (granülosit, monosit, lenfosit)*
- *Kolay kullanım -direkt hemoperfüzyon*
- *Gama ile steril edilmiştir / ETO'suz*

Özellikler & Avantajlar

Özellikler


1. YENİLİKÇİ - LCAP Tedavisi, Cellsorba lökosit uzaklaştırıcı filtreyi kullanarak, inflamasyonda rol oynayan lökositleri (örneğin, gronüosit, monosit, lenfosit) uzaklaştırır. Bu yöntem, hastaların inflamatuvar durumlarıyla ilgili klinik durumlarını etkilemek için kullanılabilir.
2. KOLAY - Her seansı yaklaşık 1 saat süren, basit, ekstrakorporeal bir işlemdir.

Avantajlar:

KLİNİK ETKİNLİK - Aktif ülseratif kolit hastalarının % 74'ünde remisyon ve iyileşme gözlemlenmiştir. (Matsumoto, et al. Ther Apher Dial. 12:484-90,2008)

Yapı

Tam kan silindirik, dokumasız kumaş içinden geçer. Dokumasız kumaş lökositleri filtrasyon ve adezyonla uzaklaştırır.

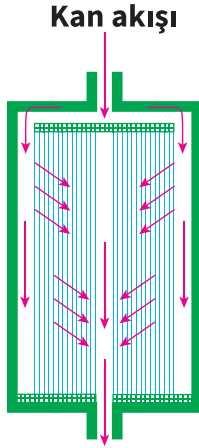


Özellikler

Materyaller	Polietilen teleftalattan yapılmış, dokumasız kumaş
Kolon Hacmi	170 mL
Kolon boyutu	200mm[L] - 45mm[D]
Sterilizasyon	Gama ışını


Akış Şeması

Koşul

- Kan akış hızı: 50mL/dak
- İşlenen kan hacmi: 2-4 L/işlem
- Antikoagülan: ACD-A, Heparin

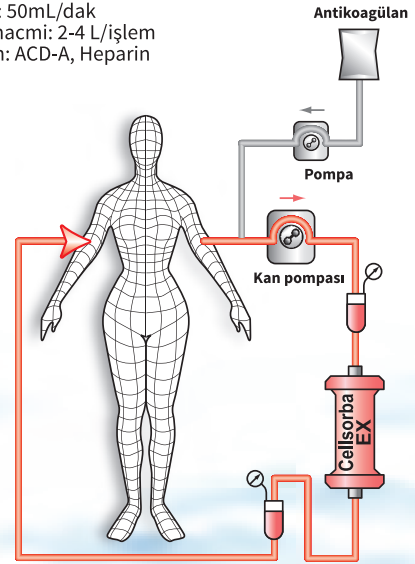

Cellsorba EX'in dokumasız kumaş yapısındaki lökositlerin Tarama Elektron Mikroskobu görüntüsü

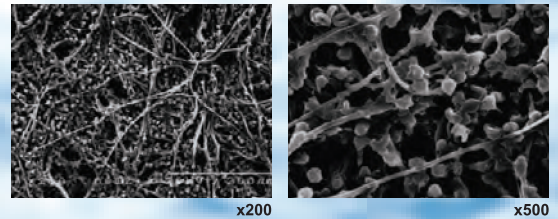

AsahiKASEI

Üretici:
ASAHI KASEI MEDICAL CO., LTD.
1-105 Kanda Jinbocho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8101, Japan
TEL: +81-3-3296-3727 FAX: +81-3-3296-3722
URL: <http://www.asahikasei-medical.com>

Avrupa Temsilcisi:
ASAHI KASEI MEDICAL EUROPE GmbH
Herriotstrasse 1, 60528 Frankfurt am Main, Germany
TEL: +49 (0) 69 66 37 15 00 FAX: +49 (0) 69 6 66 51 93

Amerika Temsilcisi:
ASAHI KASEI MEDICAL AMERICA INC.
3570 Winchester Road, Suite 101, Memphis, Tennessee 38118, USA
TEL: +1-901-362-6105 FAX: +1-901-362-6180

DİSTRİBÜTÖR

HİTİT TIBBİ CİHAZLAR ULUS. TAŞ. GIDA VE TAR. TEKS. SAN. TİC. A.Ş.



Korutürk Mh. Kestane Sk. No: 42/1
35330 Balçova İzmir, TÜRKİYE
Tel: (+90) 232.278 52 01 • Faks: (+90) 232.278 52 84
www.hititmedical.com • info@hititmedical.com

CE
0086